



金刚砂车针

70844

【产品名称】

金刚砂车针

【型号、规格】

工作部分形状	型号
圆球形	440SS、3440SS、440S、440、1440、3440、340、1340、340S、F440R、SF440、MI-1R、MI-2R、MI-3R、117、144、145、SF319、SF219、SF313R、SF145、MI-F06R、MI-F06RL、MI-F06P、MI-F06PL、893V、0893、0896、0897、0899
倒截锥形	421M、421、321M、321、120、421SS、1421SS、3421SS、421S、1421S、321S、435、335、148、149、150、248、SF150、2421SS、899V
轮型	330、230、130、325、111、121、122、SC111
平头圆柱形	411、1411、411M、311、1311、211、1211、F414SS、F414S、F414
平头锥型	401M、401、1401、3401、301、1301、3301、301M、201S、201、1201、101S、101、1101、101L、1101L、202、1202、3202、103、1103、SF201、SF101、C101、C202、C101X、C103X、301CR、202CR、201CR、101CR、103CR、206CR、207CR、SF301CR、SF202CR、SF201CR、SF101CR、SF103CR、SF206CR、SF207CR、2401、2303、2304、825V、826V、833V、836V、839V、808V、202S、SC101、SC202R、SC301R
圆头柱型	214、311RM、212R、213R、114S、114、SF114、SC144、SC165R、201SR、201R、1201R、3201R、104R、1104R、3104R、101R、1101R、102R、1102R、3102R、103R、1103R、105R、106RD、107RD、F201R、F1201R、F104R、F102R、F105R、SF104R、SF1104R、SF102R、SF102RD、SF106RD
圆头锥型	SF107RD、C102R、C105RX、SF318、201Ra、104Ra、101Ra、SF201Ra、SF206Ra、304、204、1204、3204、104、1104、3104、104L、246、F204、F1204、F104、SF204、SF215、SF416、SF217、C104LL、G2、0825、0826、0833、0836、0839、101SR、SC102R、SC104R、SC106RD、SC201R
尖头圆柱型	316、215、1215、3215、216、1216、115、116、F215、F1215、F216、215S、319
圆头倒锥型	461R、3461R、462R、364R、265R、165R、SF265R、C165R、MI-1P、MI-2P、MI-3P
规格	1支/盒, 3支/盒, 6支/盒, 8支/盒, 10支/盒, 14支/盒, 17支/盒

【适用范围】

适用于牙科临床治疗磨削牙体, 制备洞型及牙体预备用。

【主要结构组成或者成分】

金刚砂车针的工作端和柄部由不锈钢制成, 工作端上的金刚砂是以电化学方法电镀到车针的工作端。

【警告】

1. 仅限于齿科医生使用。
2. 一定要在每次使用时进行高压蒸汽灭菌。
3. 禁止在齿科范围以外使用。
4. 使用时不可超过所指定的最大允许转速。

【使用说明】

根据用途选择合适的金刚砂车针, 安装到牙科用手机上, 用于牙齿的磨削。

【使用注意事项】

1. 为了防止感染, 使用前进行高压蒸汽灭菌, 确认灭菌后使用。灭菌方法: 高压蒸汽灭菌 (134°C 3 分, 或者 121°C 30 分)
2. 按照牙科用手机制造厂家的指示确认把柄部插入底部, 要确认不为半插入状态。
3. 使用与本品相配的牙科用手机时, 要严格遵守牙科手机的使用说明书进行使用。
4. 使用前在口腔外, 事先进行旋转试验, 如有偏转或异常要马上丢弃。
5. 给患者使用前要确认是否有变形, 伤痕, 裂纹等, 一旦发现马上丢弃。
6. 使用本品时, 请戴上保护眼镜及防尘口罩。
7. 不要在记载用途以外使用。
8. 仅限于牙科医生使用。
9. 丢弃时作为医疗废弃物进行处理。
10. 本品刃部较锋利, 使用时注意不要刺伤手。

【储存方法】

1. 避免在高温、多湿、日光直射及潮湿的地方保存。
2. 不要弄破包装。

【生产日期】

见批号 (LOT MMYYYX → 20YY 年 MM 月生产)

【使用期限】

无

【包装】

【单品包装】

10 支/盒

【套装包装】

SHOFU MICD DIA SET 6 支/盒

SHOFU Crown & Bridge PREPARATION KIT 14 支/盒

SHOFU Direct Cosmetic RESTORATION KIT 8 支/盒

SHOFU All Ceramic Preparation Kit 17 支/盒

【注册人/生产企业】

名称: 株式会社松风

住所: 日本京都府京都市东山区福稻上高松町 11 番地

生产地址: 日本京都府京都市东山区福稻上高松町 11 番地

电话: +81-75-561-1112

【代理人/售后服务单位】

名称: 松风齿科器材贸易 (上海) 有限公司

住所: 上海市松江区余山工业区吉业路 645 号 1 幢 3 层

电话: 021-5779 6980

传真: 021-5779 6981

【注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进 20162063038



松风后牙制备套装

SHOFU POSTERIOR PREPARATION KIT

用于后牙牙体预备和修形

松风后牙制备套装是参考了大多数医生使用习惯与要求而专门设计的新车针工具套装，使后牙修复的牙体制备和修形更加快速有效。

【特点】

- 特别精选的 10 支 FG 金刚砂车针可以快速、简单、准确的进行后牙牙体制备。
- 套装配备可耐高温高压消毒的车针座，方便实用，便于车针的消毒和管理。

【使用说明】

后牙制备：

- | | |
|----------------|--------------------|
| 金刚砂车针 FG 202 | ：用于前磨牙殆面的制备 |
| 金刚砂车针 FG 201CR | ：用于磨牙颊舌面的牙体制备 |
| 金刚砂车针 FG 102R | ：用于前磨牙颊舌面的牙体制备 |
| 金刚砂车针 FG 212R | ：用于舌侧及肩台倒角的制备 |
| 金刚砂车针 FG 201Ra | ：安全尖车针，用于接近龈端的部分制备 |
| 金刚砂车针 FG 148 | ：用于磨牙殆面的制备 |

抛光修型：

- | | |
|----------------|--------------------------|
| 金刚砂车针 FG F201R | ：用于完成制备的牙体抛光 |
| 金刚砂车针 FG F414S | ：肩台护龈车针，用于肩台的修整，完全不会伤害牙龈 |

精细抛光：

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 金刚砂车针 FG SF102R | ：用于完成制备后牙体的唇侧 / 邻面的精细抛光 |
| 金刚砂车针 FG SF219 | ：用于完成制备后牙体的舌侧的精细抛光 |

【最大推荐转速】

- | | |
|-----------------|-----------------------------|
| 低于 450,000 转每分钟 | ：201CR、201Ra、F201R |
| 低于 300,000 转每分钟 | ：202、102R、212R、F414S、SF102R |
| 低于 160,000 转每分钟 | ：148、SF219 |

精细抛光

		
	SF102R	SF219
头部直径	1.1mm	0.8 mm
头部长度	9mm	5mm
车针长度	22mm	19mm

【注释】

松风车针常用标记：

1000 - 短柄	3000 - 超短柄	SC - 黑标超粗	C - 绿标粗
MI - 微创车针	F - 细	SF - 超细	R - 圆形
SR - 小圆形	RM - 中圆形	RD - 大圆形	RX - 粗圆形
CR - 圆边	S - 小号	SS - 超小号	M - 中号
L - 大号	LL - 超大号	X - 粗号	P - 梨形
PL - 长梨形	Ra - 安全尖形		

后牙制备

						
	202	201CR	102R	212R	201Ra	148
头部直径	1.5mm	1.1mm	1.1mm	1mm	0.7mm	1.4mm
头部长度	5mm	7mm	9mm	6mm	7mm	4.8mm
车针长度	19mm	21mm	22mm	21mm	21mm	19mm

抛光修型

		
	F201R	F414S
头部直径	0.7mm	1.01mm
头部长度	7mm	9mm
车针长度	21mm	21mm