

编制日期：2017年1月 第1版
2018年6月 第2版
2019年5月 第3版

合成树脂牙

【产品名称】

合成树脂牙

【型号、规格】

型号：Liveraα

规格：Liveraα（力维牙α）包括前牙和后牙

前牙包括：上颌/下颌的右/左中切牙、侧切牙和尖牙

后牙包括：上颌/下颌的右/左第一前磨牙、第二前磨牙、第一磨牙和第二磨牙

牙位	色号	形态	大小	左右	部位
上前牙	A1	HT（尖形） HC（混合形） HSS（短方形）	3	左侧 右侧	中切牙 侧切牙 尖牙
	A2		4		
	A3		5		
下前牙	A3.5		6		
	B2				
上后牙	A2	M	28	左侧 右侧	第一前磨牙 第二前磨牙 第一磨牙 第二磨牙
	A3		30		
	A3.5		32		
下后牙	B2		34		

【适用范围】

该产品用于制作局部义齿和全口义齿。

【主要结构组成或者成分】

本产品主要由聚甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯、乙二醇二甲基丙烯酸酯组成。

【禁忌症】

使用本产品而导致出现发疹、皮炎等过敏症状的患者或操作者，请中止使用并迅速就医。

【注意事项】

[使用注意]

- 1)制作蜡义齿时，注意不要将人工牙部分接触到火焰。
- 2)本产品与热塑性基托树脂不能粘结，因此务必要设计机械固位。
- 3)对本产品切削、打磨时，为避免粉尘对人体的不利影响，请使用吸尘装置/防尘口罩/护目镜等进行防御。
- 4)本产品只适用于【适用范围】所记载的用途。
- 5)本产品仅供牙科专业人士使用。

[其他注意]

- 1)请指导患者在使用义齿时需注意以下的一般事项：
保持义齿清洁。吃饭后，使用柔软的义齿用牙刷，轻柔地去除食物残渣并进行清洁。
建议使用义齿专用清洁剂等效果更佳。

【贮存方法】

- 1)本产品需避开高温多湿及直射阳光的场所保存。
- 2)避免非牙科专业人士接触到本产品，请妥善保存及管理。

【生产日期】

见批号（LOT）20YYMMDD → 20YY 年 MM 月 DD 日生产）

【使用期限】

有效期：10年

【注册人/生产企业】

名称 上海松风齿科材料有限公司
住所 上海市松江区佘山工业区吉业路645号
生产地址 上海市松江区佘山工业区吉业路645号2幢1楼，3幢1楼B区
电话 021-5779 6991
传真 021-5779 6910
生产许可证编号 沪食药监械生产许20192366号

【售后服务单位】

名称 上海松风齿科材料有限公司
地址 上海市松江区佘山工业区吉业路645号
电话 021-5779 6991

【注册证书编号/产品技术要求编号】

注册证编号：国械注准20193170078