

玻璃水门汀CX (粘结)

72588

【产品名称】

玻璃水门汀 CX (粘结)
歯科合着用グラスポリアルケノエートセメント

【型号、规格】

型号: HY-bond Glasionomer CX
规格: 粉 45g、液 30g

【适用范围】

用于金属冠、桥、嵌体和正畸托槽直接与预备好的牙面的粘接。

【结构及组成】

本品由粉剂和液剂组成。粉剂主要成分: 玻璃微粉、二氧化硅。液剂主要成分: 聚丙烯酸水溶液。

【禁忌症】

对本品或玻璃离子水门汀有发疹、皮肤炎等过敏史的患者或操作者请勿使用。

【使用说明】

- 1) 粉/液的标准比例为: 2.0g / 1.0g (粉 1 平匙: 液 2 滴)
- 2) 调和
用附带的调拌刀将粉、液在 30 ~ 40 秒内调拌均匀。(最长 60 秒)

调和温度条件	23±1℃
调和时间	30 ~ 40 秒
工作时间	4 分 30 秒
净固化时间	4 分 00 秒

- 3) 粘结
将修复体及牙质的粘结部位清洁、干燥后, 按照常规方法用调和好的水门汀进行粘结。

【注意事项】

〔使用方法和相关使用注意事项〕

- 1) 请使用附带取量匙, 刮平量取粉末。
- 2) 请将容器颠倒去除气泡后再滴下所需液体。
- 3) 为了准确, 请在量取前用湿纱布等擦去容器瓶口的多余液体。
- 4) 使用后请立即密封粉末及液体的容器。特别对粉末要注意防潮。
- 5) 修复体上多余的水门汀, 需在固化前用湿纱布等迅速去除。
- 6) 在露牙髓或近髓等的病例中, 需用氢氧化钙制剂等进行牙髓保护。

〔使用注意事项〕

- 1) 本品仅适用于【适用范围】所记载的用途。
- 2) 本品仅供牙科专业人员操作使用。

〔重要的基本注意事项〕

- 1) 在本产品的使用中, 若患者或操作者出现发疹、皮肤炎等过敏症, 请中止使用并速就医。
- 2) 注意勿将液体或调和物附着在口腔软组织、皮肤或弄入眼中。如有附着, 立即用酒精棉擦拭后, 并用流水洗净; 万一本产品进入了眼中, 请立即用大量流水洗净后, 并接受眼科医生的诊治。

【贮存方法】

- 1) 本品需避免阳光直射、高温、多湿等, 贮存在室温 (1 ~ 30℃) 下。
- 2) 避免非牙科专业人员接触本产品, 请妥善保存及管理。

【生产日期】

见包装

【使用期限】

有效期: 4 年
本品的使用期限见包装所示。
( YYYY-MM-DD → 表示使用期限至 YYYY 年 MM 月 DD 日)

【注册人 / 生产企业】

名称 株式会社 松风
住所 日本京都府京都市东山区福稻上高松町 11 番地
生产地址 日本京都府京都市东山区福稻上高松町 11 番地
电话 +81-75-561-1112

【代理人 / 售后服务单位】

名称 松风齿科器材贸易(上海)有限公司
住所 上海市松江区佘山工业区吉业路 645 号 1 幢 1-3 层
电话 021-5779 6980
传真 021-5779 6981

【注册证编号 / 产品技术要求编号】

国械注进 20153173775