



牙科用研磨材料

【产品名称】

牙科用研磨材料

【型号、规格】

松風ダイヤモンドポイント (SHOFU Diamond Point)

【适用范围】

用于对齿科材料的研磨抛光

【作用对象】

牙齿、烤瓷牙以及陶瓷材、复合树脂、硬质树脂、金属的修复体

【主要结构组成或者成分】

工作部: 通过电镀使金刚石磨粒固定

轴柄部: 不锈钢

【使用说明】

- 1) 将本产品进行灭菌处理。
- 2) 安装在牙科手机上, 按常规方法使用。
- 3) 需再次使用时, 请迅速用清洗液或消毒剂除去附着物后, 进行灭菌处理。
灭菌方法: 使用高温灭菌器进行灭菌
(134°C 3分或 121°C 30分)

【注意事项】

- 1) 使用时不可超过规定的最大转速 (见产品包装上记载)。

最大转速:

5,000min ⁻¹	F110PM
20,000min ⁻¹	F4R、F5R、F16R (工作部: 精细)
30,000min ⁻¹	44、80、111、112 (工作部直径为≥ φ5mm)
50,000min ⁻¹	除上述以外 (工作部直径为< φ5mm)

- 2) 不可使用有变形、摇晃、损伤 (生锈、表面划伤、弯曲、污损) 等的产品。
- 3) 请按照牙科手机的厂家说明书正确安装。确保将轴柄插入到底, 并确认已卡牢。
- 4) 使用前需进行试转操作, 确认无摇晃。
- 5) 由于工作部外形较细、较长、较大的容易发生弯曲或折断, 因此操作时应避免不合理角度或过度施压。
- 6) 为了防止摩擦生热使牙齿受损, 请在注水下, 间断式轻触切削。

- 7) 再次使用时, 用清洗液、消毒剂去除附着物后, 通过高温灭菌器、高压蒸汽灭菌器、干燥灭菌或使用药剂进行消毒。另外, 请不要使用氯系消毒剂, 以避免引发腐蚀。在使用清洗液、消毒剂和灭菌器时, 请按照各厂家的说明书正确操作。
- 8) 用本产品进行打磨时, 请使用局部吸尘装置以及相关部门认可的防尘口罩等。
- 9) 为了防止眼睛受损伤, 请使用护目镜等。
- 10) 本产品不可用于【适用范围】所记载的用途之外。
- 11) 非牙科专业人士不可使用本产品。

【贮存方法】

- 1) 避免将本产品暴露在有水分、腐蚀性药剂以及腐蚀性蒸气的环境下。请保管在不受外力挤压 (物理负荷) 和污染的地方。
- 2) 避免非牙科专业人士接触到本产品, 请妥善保管及管理。

【生产日期】

见包装批号 (LOT MMYYYX → 20YY 年 MM 月生产)

【使用期限】

无有效期

【家人 / 生产企业】

名称 株式会社 松风
住所 日本都府京都市东山区福稻上高松町 11 番地
电话 +81-75-561-1112
生产地址 日本都府京都市东山区福稻上高松町 11 番地

【代理人 / 售后服务单位】

名称 松风齿科器材贸易 (上海) 有限公司
住所 上海市松江区佘山工业区吉业路 645 号 1 幢 1-3 层
电话 021-5779 6980
传真 021-5779 6981

【备案凭证编号 / 产品技术要求编号】

国械备 20170333 号