



CN02\_72216

## 牙科用研磨材料

### 【产品名称】

牙科用研磨材料

### 【型号、规格】

フィッシャーカーバ (SHOFU Fissure Carbide Bur)

### 【适用范围】

用于对齿科材料的研磨抛光

[作用对象]

修复体细部

### 【主要结构组成或者成分】

工作部：碳化钨

轴柄部：不锈钢

### 【使用说明】

#### 1) HP 用

利用工作部的尖锐部分，对牙冠修复体进行咬合面形成或对细部进行精细切削等。需要间断式操作以避免磨擦生热。

#### 2) FG 用

配合技工用气动打磨手机，利用工作部的尖锐部分，对陶瓷材进行裂沟形成。需要轻触式操作以避免磨擦生热。

### 【注意事项】

- 1) 使用时不可超过规定的最大转速（见产品包装上记载）。
- 2) 不可使用有变形、损伤（生锈、表面划伤、弯曲、污损）等的产品。
- 3) 请按照牙科手机的厂家说明书正确安装。确保将轴柄插入到底，并确认已卡牢。
- 4) 使用前需进行试转操作，确认无摇晃。
- 5) 安装时不可强扭强拧。
- 6) 由于工作部形状细长容易折断，应小心操作，用力尽量轻柔。
- 7) 使用刚开始时，比较容易折断，需要格外小心。
- 8) 工作部的尖锐部的使用深度应在 0.8mm 左右以内，且不可使用其他部分（如工作部的侧面等）。
- 9) 由于前端尖锐，所以操作时要充分注意。特别是在安装压入式卡锁的时候，请小心不要扎伤手指以及折断工作部。
- 10) 为了防止眼睛受损伤，请使用护目镜等。
- 11) 本产品不可用于【适用范围】所记载的用途之外。
- 12) 非牙科专业人士不可使用本产品。

### 【贮存方法】

- 1) 避免将本产品暴露在有水分、腐蚀性药剂以及腐蚀性蒸气的环境下。  
请保管在不受外力挤压（物理负荷）和污染的地方。
- 2) 避免非牙科专业人士接触到本产品。请妥善保存及管理。

### 【生产日期】

见包装

### 【使用期限】

无有效期

### 【备案人 / 生产企业】

名称 株式会社 松风  
住所 日本京都府京都市东山区福稻上高松町 11 番地  
电话 +81-75-561-1112  
生产地址 Am Brüll 17 40878 Ratingen Deutschland  
日本京都府京都市东山区福稻上高松町 11 番地

### 【代理人 / 售后服务单位】

名称 松风齿科器材贸易（上海）有限公司  
住所 上海市松江区佘山工业区吉业路 645 号 1 幢 1-3 层  
电话 021-5779 6980  
传真 021-5779 6981

### 【备案凭证编号 / 产品技术要求编号】

国械备 20170333 号