



松風技工用カーバイドバー

修订日期: 2019年12月

备案凭证编号: 国械备20170333号

CN04_72215

牙科用研磨材料

【产品名称】

牙科用研磨材料

【型号、规格】

松風技工用カーバイドバー
(SHOFU Lab Carbide Bur)

【适用范围】

用于对齿科材料的研磨抛光

[作用对象]

树脂牙床、钴铬合金、石膏模型

【主要结构组成或者成分】

工作部: 碳化钨

轴柄部: 碳化钨或不锈钢

【使用说明】

将本产品安装在牙科用电动式手机、牙科用电动机、微型马达或高速打磨机等上, 按常规方法使用。

【注意事项】

- 1) 使用的时候不可超过规定的最大转速(见产品包装上记载)。
- 2) 不可使用有变形、摇晃、损伤(生锈、表面划伤、弯曲、污损)等的产品。
- 3) 请按照牙科手机的厂家说明书正确安装。确保将轴柄插入到底, 并确认已卡牢。
- 4) 使用前需进行试转操作, 确认无摇晃。
- 5) 由于磨头外形较大的容易发生弯曲和折断, 因此操作时应避免不合理角度或过度施压。
- 6) 操作时, 需注意避免摩擦生热, 以防工作部受损。
- 7) 由于工作部形状细长的容易折断, 应小心操作, 用力尽量轻柔。
- 8) 用本产品进行打磨时, 请使用局部吸尘装置以及相关部门认可的防尘口罩等。
- 9) 为了防止眼睛受损伤, 请使用护目镜等。
- 10) 本产品不可用于【适用范围】所记载的用途之外。
- 11) 非牙科专业人士不可使用本产品。

【贮存方法】

- 1) 避免将本产品暴露在有水分、腐蚀性药剂以及腐蚀性蒸气的环境下。请保管在不受外力挤压(物理负荷)和污染的地方。
- 2) 避免非牙科专业人士接触到本产品, 请妥善保存及管理。

【生产日期】

见包装

【使用期限】

无有效期

【备案人 / 生产企业】

名称 株式会社 松风

住所 日本京都府京都市东山区福稻上高松町
11 番地

电话 +81-75-561-1112

生产地址 Ländenstr. 1 93339 Riedenburg
Germany

Am Brüll 17 40878 Ratingen

Deutschland

日本京都府京都市东山区福稻上高松町
11 番地

【代理人 / 售后服务单位】

名称 松风齿科器材贸易(上海)有限公司

住所 上海市松江区佘山工业区吉业路 645 号
1 幢 1-3 层

电话 021-5779 6980

传真 021-5779 6981

【备案凭证编号 / 产品技术要求编号】

国械备 20170333 号