



咬合纸

72212

【产品名称】

咬合纸

【型号规格】

| 型号                                 | 规格              |
|------------------------------------|-----------------|
| 松風 咬合紙<br>SHOFU ARTICULATING PAPER | 赤色<br>红色 (RED)  |
|                                    | 青色<br>蓝色 (BLUE) |

【适用范围】

用于记录或检查牙齿咬合关系。

【形状和种类】

- 1) 形状 121mm (长) ×22mm (宽) ×38μm (厚)  
2) 种类: 2 种类 (红色、蓝色)

【原理】

将本产品置于患者上下牙齿之间，通过咬合时上下牙齿或修复体与之接触处被染上的红色或蓝色，以确认牙齿咬合状态。

【使用方法】

- 1) 将本产品置于口腔内，咬合上下牙齿或修复体，对咬合印迹进行记录。  
2) 取出本产品，使用常规方法进行咬合调整。

【使用注意】

- 1) 不同患者之间应更换本产品使用。  
2) 本产品是涂有染料的纸，请注意不要染到衣服或皮肤上。  
3) 如果手指被染上颜色，请迅速用中性洗涤剂洗手去除，以免沾染他处。

【储存方法】

- 1) 本产品需放置在避免高温、多湿、阳光直射或可能沾水的地方。  
2) 本产品需妥善保管，避免非牙科专业人士触摸。

【生产日期】

见包装

【使用期限】

10 年

【备案人 / 生产企业】

名称 株式会社 松风  
住所 日本京都府京都市东山区福稻上高松町 11 番地  
生产地址 日本京都府京都市东山区福稻上高松町 11 番地  
电话 +81-75-561-1112

【代理人 / 售后服务单位】

名称 松风齿科器材贸易（上海）有限公司  
住所 上海市松江区佘山工业区吉业路 645 号 1 幢 1-3 层  
电话 021-5779 6980  
传真 021-5779 6981

【备案凭证编号 / 产品技术要求编号】

国械备 20170637 号